




Nr.	Betegnelse
1	4 indstillelige fødder til gulvudligning
2	Fodkontakt til elektriske indstillingsfunktioner
3	Instrumentbakke, hvid, udtrækkelig, drejelig
4	Komfort-fodplader inkl. kunstlæderbetræk på håndtag, som option (tilbehør art.-nr. 81726_1)
5	Polstring
6	Nakkepolstring med magnetfastgørelse, som option (tilbehør art.-nr. 40023)
7	Papirrulleholder
8	Håndbetjening
9	Holdebeslag til benholdertilpasning
10	Hovedafbryder (ikke synlig, på stolens bagside, lyser grønt)

### Fodkontakt

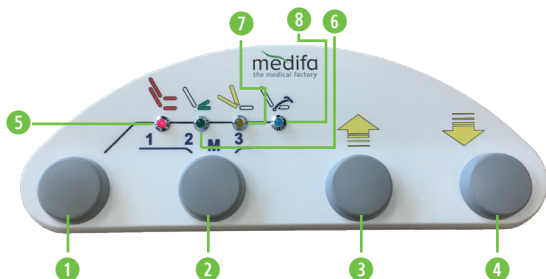

Nr.	Funktion	Information
1	Funktionsvalgknop	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forvalg af de forskellige lejringsfunktioner. Den valgte funktion vises med den tilsvarende LED.</li> <li>Forvalg af den gemte lejringsposition M1 til M3</li> </ul>
2	Memory-funktion	<p>Med memory-funktionsknappen kan stolen køres i den valgte position.</p> <p><b>OBS: En ønsket memory-position kan kun gemmes via håndbetjeningen.</b></p>
3+4	Retningsknapper	Den pågældende funktions retningsknapper
5	Højdeindstilling	LED visning af højdeindstillingsfunktionen
6	Bækkenindstilling	LED visning af bækkenindstillingsfunktionen
7	Rygindstilling	LED visning af rygindstillingsfunktionen
8	Benholderindstilling	LED visning af benindstillingsfunktionen

### Håndbetjening



Nr.	Funktion	Information
1	Funktionsvalgknap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forvalg af de forskellige lejringsfunktioner. Den valgte funktion vises med den tilsvarende LED.</li> <li>Forvalg af den gemte lejringsposition M1 til M3</li> </ul>
2+3	Retningsknapper	Den pågældende funktions retningsknapper
4	Gemmeknap	Den aktuelle stolposition kan gemmes med gemmeknappen. Brugerniveauet og det memory-positionsnummer, hvorunder positionen skal gemmes, skal vælges på forhånd. Derefter skal gemmeknappen trykkes i ca. 3 sekunder. På displayet vises „SAVE“.
5	Memory-funktionsknap	De gemte positioner kan hentes med memory-knappen. Ved berøring af knappen kører stolen automatisk i den gemte position. Memory-positionen er defineret af brugerniveauet og memory-positionsnummeret. Den automatiske kørsel kan til enhver tid afbrydes ved tryk på en vilkårlig knap (undtaget „M“-knap).
6	Brugerniveau-knap	Med denne knap kan brugerniveauet vælges. Op til 4 brugere kan programmere deres individuelle memory-position i stolen. Der kan programmeres op til 3 positioner pr. brugerniveau.
7	Højdeindstilling	LED visning af højdeindstillingsfunktionen
8	Bækkenindstilling	LED visning af bækkenindstillingsfunktionen
9	Rygindstilling	LED visning af rygindstillingsfunktionen
10	Benholderindstilling	LED visning af benindstillingsfunktionen