

medifa

Member of REINSBERG® GROUP



medifa 5000

Mobile
OP-Tische

Made in Germany

Vorteile auf einen Blick


- Manuelle und elektrische Varianten
- Varianten mit niedriger Aufstieghöhe (600 mm)
- Wahlweise mit oder ohne Längsverschiebung
- Wahlweise mit viskoelastischen SF-Polstern oder PUR-Polstern erhältlich
- Alle Metallkomponenten aus hochwertigem Edelstahl (1.4301)
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Einfache Manövrierbarkeit mit Hilfe von richtungsstabil einstellbaren Rollen
- Leichtgängige Auslösemechanismen
- Durchdachtes Bedienkonzept
- Vielfältige Einsatz- und Lagerungsmöglichkeiten
- Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet
- Umfangreiche Zubehörpalette für alle chirurgischen Disziplinen
- Maximal zulässige Gesamtbelastung von bis zu 250 kg (550 lbs)



Manuelle Varianten

Elektrische Varianten

Funktionalität und Ergonomie

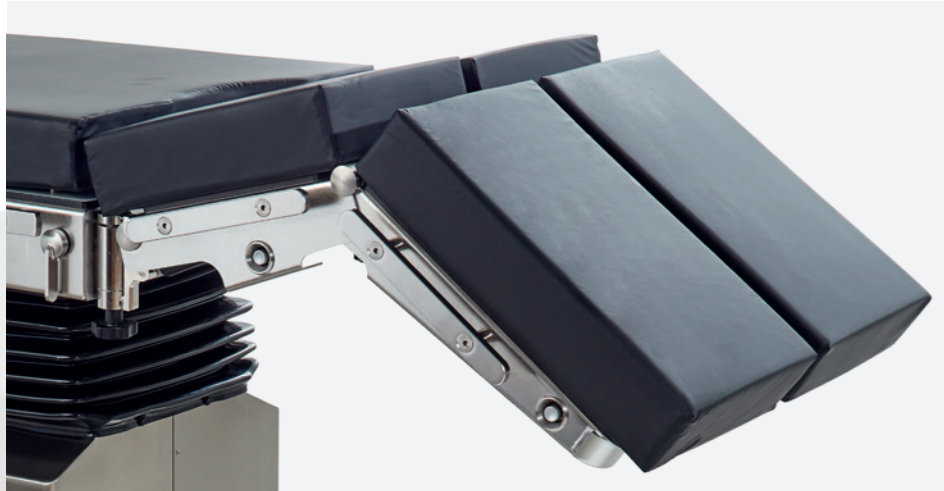

Schnelle und einfache Bedienung

- Leichtgängige Auslösemechanismen an allen Segmenten



Niedrige Grundhöhe

- Varianten mit einer niedrigen Grundhöhe von 600 mm eignen sich ideal für Anwendungen in sitzender Position



Ergonomie

- Einfaches Bewegen des OP-Tisches mit Hilfe von leichtlaufenden Doppellenkrollen
- Vordere zwei Rollen richtungsstabil feststellbar über Fußpedal
- Mit Zentralbremse




Körperbrücke

- Alle Varianten des medifa 5000 können optional mit einer manuellen Körperbrücke ausgestattet werden



Ein Befestigungssystem für alle Polster

- Befestigen und Abnehmen der Polster Elemente mit Hilfe eines Zapfensystems
- Besonders hygienisch und leicht zu reinigen (keine Klettbefestigung)
- Problemloses Wechseln zwischen SF- und PUR-Polstern

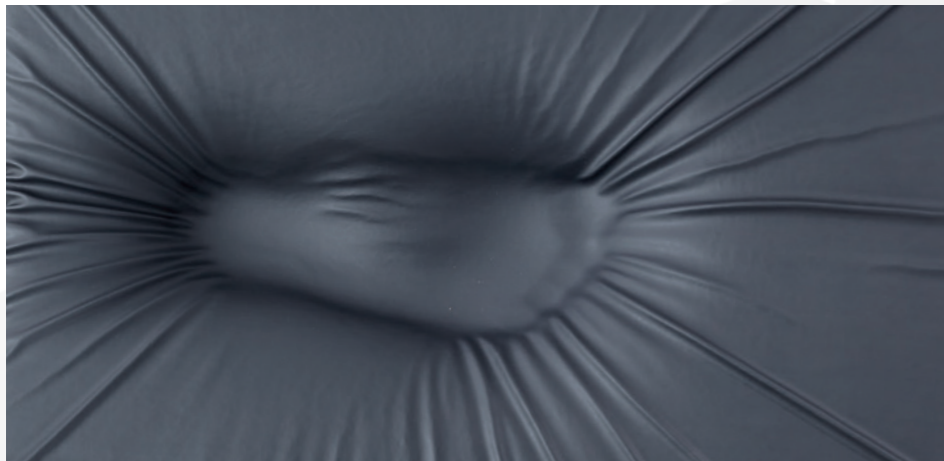

Komfort und Hygiene

- Weiche und hygienische Polster verhindern nosokomiale Infektionen und verbessern die Patientensicherheit



SF-Polster

- Kombination aus Durchliegeschutz und druckentlastendem viskoelastischen Schaum
- Dekubitusprophylaxe
- Höhe: 80 mm
- Abnehmbar
- Elektrisch ableitfähig
- Strahlendurchlässig



PUR-Polster

- Ergonomisch geformt
- Höhe: 60 mm
- Abnehmbar
- Elektrisch ableitfähig
- Strahlendurchlässig

Bedienkonzept



- Farbdisplay mit Batteriekapazitätsanzeige
- Ausführen von bis zu drei beliebigen Anwendungspositionen
- Abspeichern von bis zu drei beliebigen Anwendungspositionen
- Reverse-Mode
- Positionierungstasten
- Not-Stop-Taste
- Aktivierung des Handschalters
- Automatische Nullstellung

1. Standard: Hintergrundbeleuchteter Handschalter mit Batterieanzeige und Farbdisplay
2. Standard: Zusätzliches Bedienfeld an der Tischsäule
3. Optional: Zusätzlicher, kabelloser Infrarot-Handschalter (Art.-Nr. 604070; nicht nachrüstbar)
4. Optional: Fußschalter für Höhen-, Lateral- und Trendelenburgverstellung (Art.-Nr. 604060)



medifa 5000 manuell



Manueller Operationstisch

Art.-Nr. 501130

- Höhenverstellung mittels Fußpumpenhydraulik von 750 bis 1.000 mm
- Gasdruckfederunterstützte Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung mittels abnehmbarer Handkurbel, beidseitig verstellbar bis 20°
- Gasdruckfederunterstützte Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Wahlweise SF-Polster (H = 80 mm) oder PUR-Polster (H = 60 mm), elektrisch leitfähig, abnehmbar, strahlendurchlässig
- Fahrbarkeit über vier Doppellenkrollen ø 125 mm mit Zentralfeststellung, elektrisch ableitfähig, zwei Rollen richtungsstabil feststellbar
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 200 kg

Weitere manuelle Varianten:

Art.-Nr. 501135

Zusätzlich mit Längsverschiebung um bis zu 310 mm

Konfigurationsempfehlung

Art.-Nr. 501130
Manueller OP-Tisch

Art.-Nr. 61144SF
Kopfplatte

Art.-Nr. 61655SF
Körperbrücke

Art.-Nr. 61615SF
Geteilte Beinplatten

Art.-Nr. 61220SF
Armauflage

Preis auf Anfrage!

Fachgebiete

- Ambulanz
- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie

Alle Varianten des medifa 5000 können mit einer Vielzahl an optionalen Zubehörkomponenten ausgestattet werden.

medifa 5000 elektrisch



Konfigurationsempfehlung

Art.-Nr. 504325
Elektrischer OP-Tisch

Art.-Nr. 611445F
Kopfplatte

Art.-Nr. 616555F
Körperbrücke

Art.-Nr. 616155F
Geteilte Beinplatten

Art.-Nr. 612205F
Armauflage

Preis auf Anfrage!

Fachgebiete

- Ambulanz
- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie

Elektrischer Operationstisch

Art.-Nr. 504320

- Elektrische Höhenverstellung von 780 - 1080 mm
- Elektrische Trendelenburgverstellung von -30° bis +25°
- Elektrische Lateralverstellung, beidseitig 20°
- Elektrische Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay und Batterieanzeige
- Zusätzliche Bedieneinheit an der Tischsäule
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Wahlweise SF-Polster (H = 80 mm) oder PUR-Polster (H = 60 mm), elektrisch leitfähig, abnehmbar, strahlendurchlässig
- Fahrbarkeit über vier Doppelenkrollen \varnothing 125 mm, elektrisch ableitfähig,
- zwei Rollen richtungsstabil mittels Zentralbremse feststellbar über Fußpedal
- Netzbetrieb 110 V oder 220 V/ 50-60 Hz, inkl. Akkumulatoren und Ladegerät
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 250 kg


Weitere elektrische Varianten mit Standardhöhe:

Art.-Nr. 504325

Zusätzlich mit Längsverschiebung von bis zu 285mm

Art.-Nr. 504220

Gasdruckfeder unterstützte Rückenlehnenverstellung

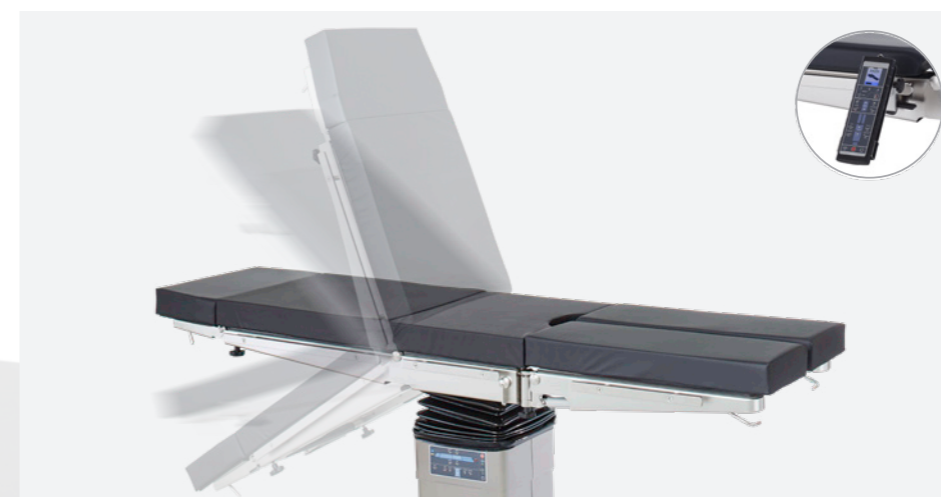

- Wahlweise mit manueller oder elektrischer Rückenteilverstellung
- Übersicht aller Konfigurationsmöglichkeiten auf Seite 16-17

medifa 5000 elektrisch

mit niedriger Höhe



Elektrischer Operationstisch

Art.-Nr. 505320

- Elektrische Höhenverstellung von 600 - 950 mm
- Elektrische Trendelenburgverstellung von -30° bis +25°
- Elektrische Lateralverstellung, beidseitig 20°
- Elektrische Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Möglichkeit zur Einstellung der Flex-/ Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay und Batterieanzeige
- Zusätzliche Bedieneinheit an der Tischsäule
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Seitliche Führungsschienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Wahlweise SF-Polster (H = 80 mm) oder PUR-Polster (H = 60 mm), elektrisch leitfähig, abnehmbar, strahlendurchlässig
- Fahrbarkeit über vier Doppellenkrollen \varnothing 125 mm, elektrisch ableitfähig,
- zwei Rollen richtungsstabil mittels Zentralbremse feststellbar über Fußpedal
- Netzbetrieb 110 V oder 220 V/ 50-60 Hz, inkl. Akkumulatoren und Ladegerät
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 250 kg


Weitere elektrische Varianten mit Standardhöhe:

Art.-Nr. 505325

Zusätzlich mit Längsverschiebung von bis zu 285mm

Art.-Nr. 505220

Gasdruckfeder unterstützte Rückenlehnenverstellung

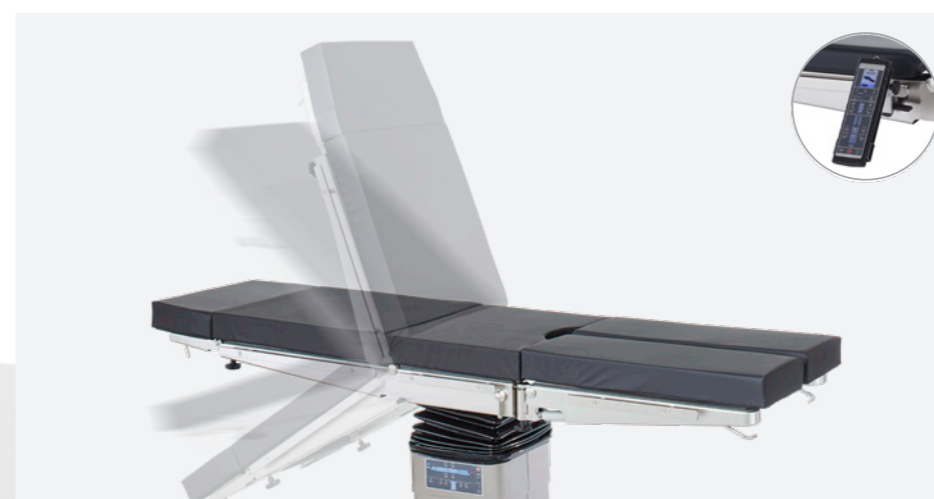

- Wahlweise mit manueller oder elektrischer Rückenteilverstellung
- Übersicht aller Konfigurationsmöglichkeiten auf Seite 16-17

Konfigurationsempfehlung

Art.-Nr. 505325
Elektrischer OP-Tisch

Art.-Nr. 61144SF
Kopfplatte

Art.-Nr. 61655SF
Körperbrücke

Art.-Nr. 61615SF
Geteilte Beinplatten

Art.-Nr. 61220SF
Armauflage



















Preis auf Anfrage!

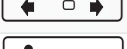

Fachgebiete

- Ambulanz
- Allgemein Chirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Proktologie

Varianten im Überblick

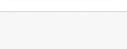● Elektrisch ■ Manuell ◆ Optional

		Manuell	
			
		501130	501135
	Höhenverstellung	■	■
	Höhenverstellung		
	Höhenverstellung		
	Trendelenburg	■	■
	Trendelenburg		
	Lateralverstellung	■	■
	Rückenteilverstellung		
	Rückenteilverstellung	■	■
	Längsverschiebung		■
	Längsverschiebung		
	Nullstellung		
	Flexbewegung	■	■
	Zentralbremse	■	■
	Körperbrücke	◆	◆
	Memory (3 Positionen)		
	Max. zulässige Gesamtbelastung	250 kg	250 kg

		Elektrisch Standard			Elektrisch mit niedriger Höhe		
							
		504220	504320	504325	505220	505320	505325
		●	●	●			
					●	●	●
		●	●	●			
		●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
			●	●		●	●
		■			■		
		●	●	●	●	●	●
		■	●	●	■	●	●
		■	■	■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●	●	●
		250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg

Lagerungsbeispiele



Rückenlagerung für
Allgemeinchirurgie



Seitenlagerung für
Thoraxchirurgie



Steinschnittlage für
Gynäkologie, Urologie und Proktologie




Rückenlagerung für
Kniearthroskopie




Beach-Chair-Lagerung für
Schulterarthroskopie


Technische Informationen

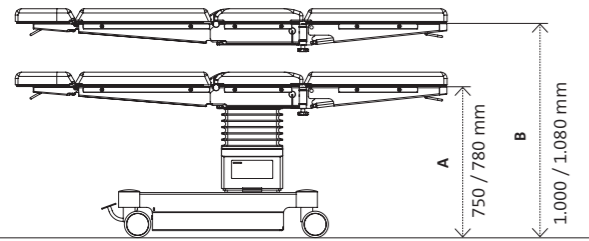

Varianten	Verstellbereich	
	Höhe A	Höhe B
501130 / 501135	750 mm	1.000 mm
504220 / 504320 / 504325	780 mm	1.080 mm





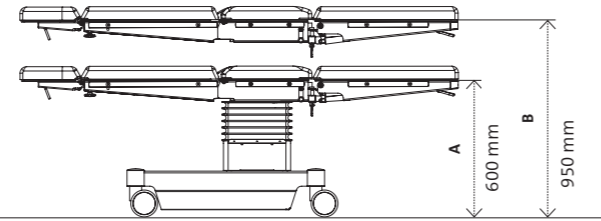


Varianten	Verstellbereich	
	Höhe A	Höhe B
505220 / 505320 / 505325	600 mm	950 mm





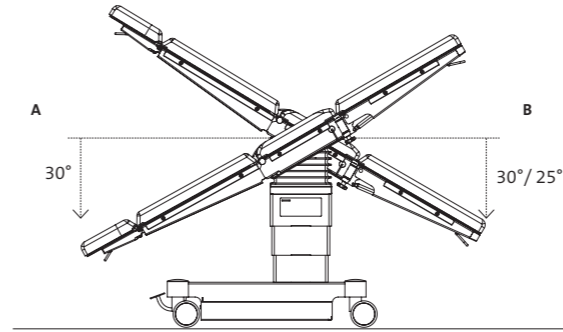


Varianten	Verstellbereich	
	A	B
501130 / 501135	30°	30°
504220 / 504320 / 504325	30°	25°
505220 / 505320 / 505325	30°	25°

Längenangaben mit SF-Polstern

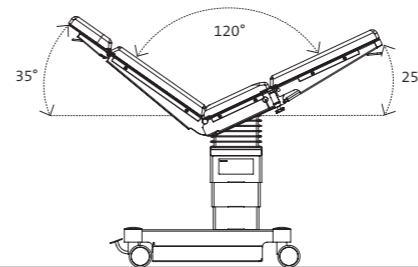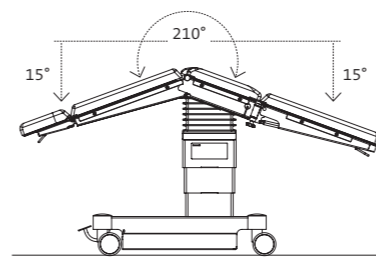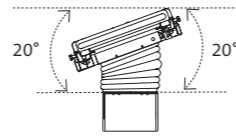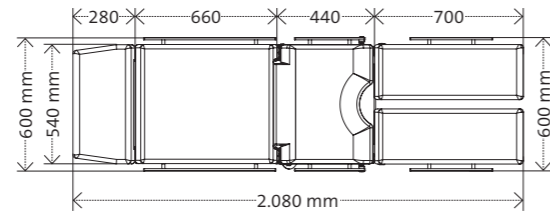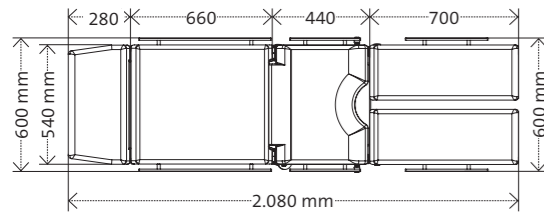


Varianten	Intraoperative Bildgebung
501135	
504325	
505325	

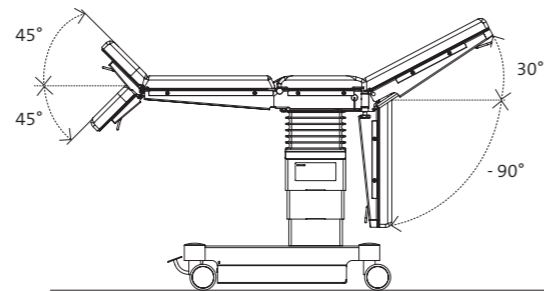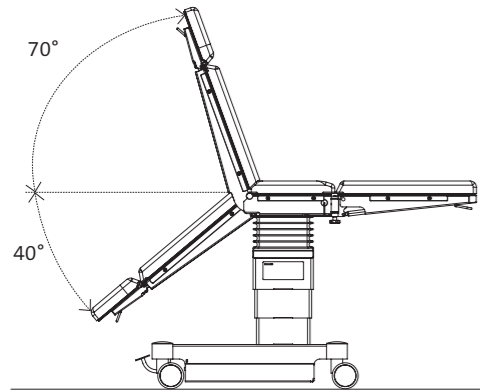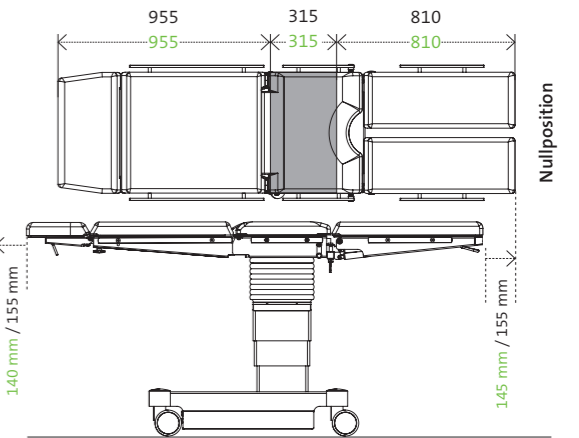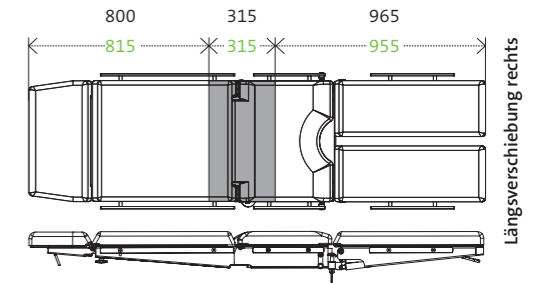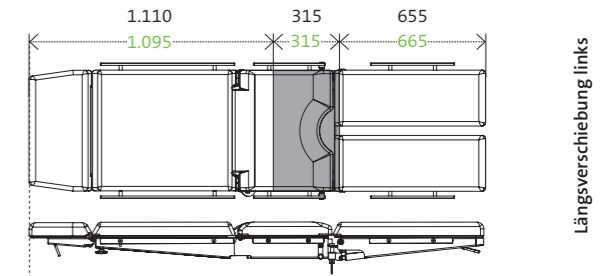

Technische Daten unterliegen einer allgemeinen Industrietoleranz von $\pm 3\%$.

Konfiguration

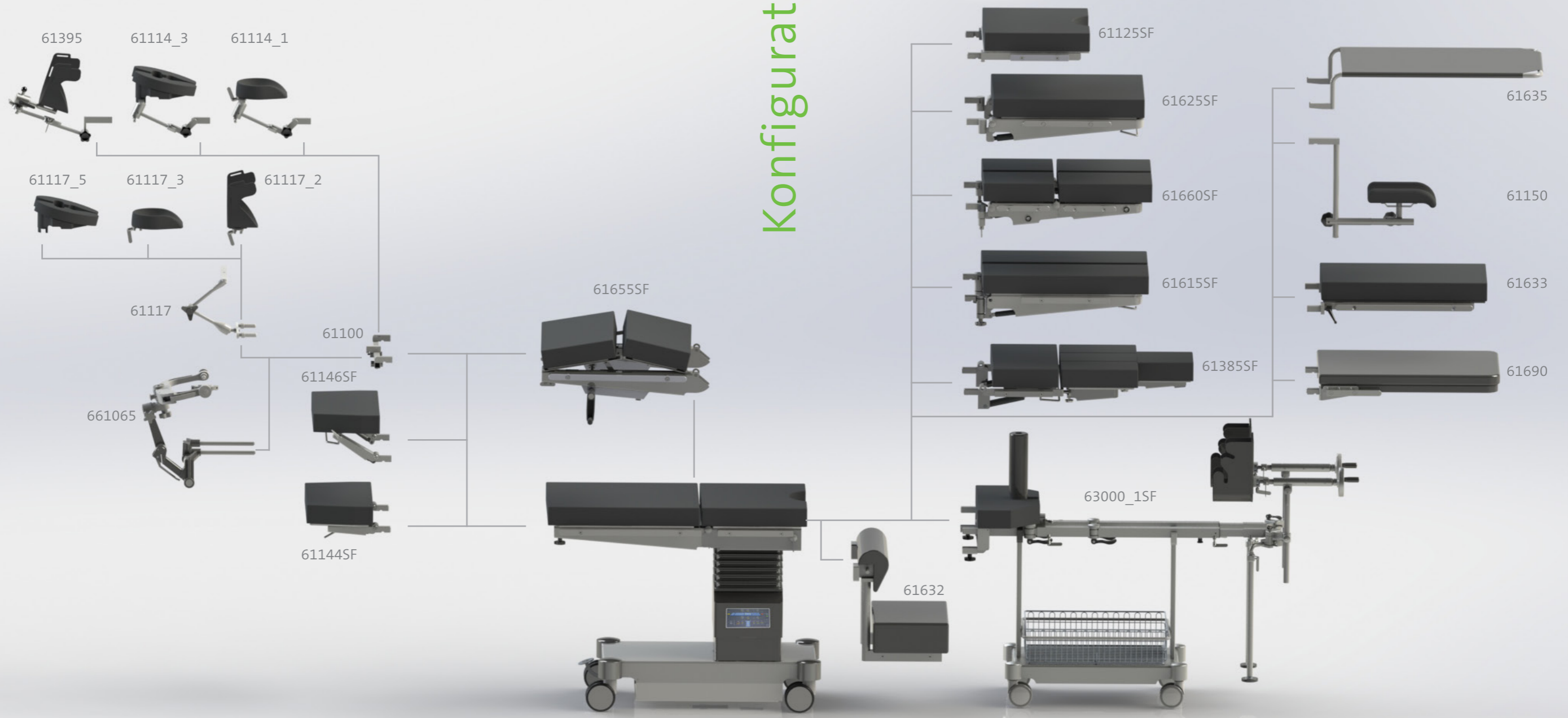



Fußschalter für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 604060

- Zur Steuerung der Grundfunktionen Höhen-, Lateral- und Trendelenburg-verstellung
- Kabelgebunden
- Nicht nachrüstbar!



Infrarot-Handschalter medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 604070

- Kabellose Datenübertragung
- Bedienfeld für alle elektrischen OP-Tisch-Funktionen
- Inkl. Ladestation



Röntgenfähige Verbindungsstrebe für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 61670

- Austausch der Edelstahl-Verbindungsstrebe am Rückenteil gegen eine röntgentransparente Verbindungsstrebe aus speziellem Kunststoff
- Verbessert die Röntgentransparenz des Rückenteils



Körperbrücke für medifa 5000 & Variante 601120

Art.-Nr. 61655SF

- Ausfahrbar mittels Handkurbel
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61655)
- Nicht nachrüstbar!



Kopfplatte für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 61144SF

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°
- L x B: 285 x 495 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61144)



Kopfplatte mit Doppelgelenk für medifa 5000 & 6000


Art.-Nr. 61146SF

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -45° bis +45°, zusätzliche Neigung durch Doppelgelenk
- L x B: 285 x 495 mm
- An- und Abkopplung an Rückenplatte
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61146)



Dreigeteilte Rückenplatte für medifa 5000 & Variante 601120
Art.-Nr. 61385SF

- Inkl. Kopfplatte mit Gasdruckfederverstellung
- Einfacher Zugang zum Schulterbereich durch drei abnehmbare Segmente
- An- und Abkopplung am Beckenteil (Reverse-Mode)
- L x B: je Segment 315 x 170 mm
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61385)

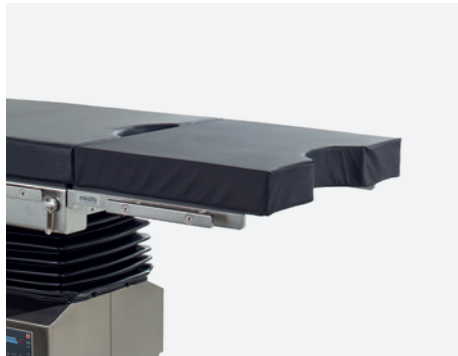


Beckenteilverlängerung für medifa 5000 & 6000 (L= 430 mm)
Art.-Nr. 61125SF

- Verlängerung des Beckenteils um 430 mm
- Polsterausschnitt
- L x B: 430 x 540 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61125)




Einteilige Beinplatte für medifa 5000 & Varianten 601120, 601700, 601820
Art.-Nr. 61625SF

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis +30°
- L x B: 670 x 540 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61625)

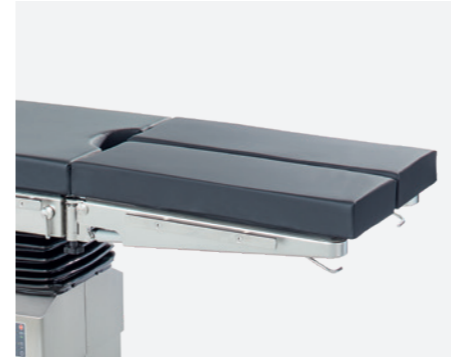

Geteilte Beinplatten für medifa 5000 & Varianten 601120, 601700, 601820 (Paar)
Art.-Nr. 61615SF

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis +30°, schwenkbar um bis zu 180°
- L x B: jede 730 x 250 mm
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61615)

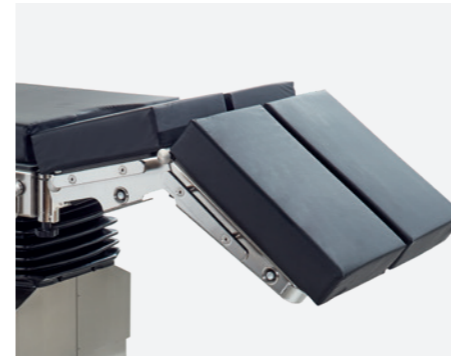


Doppelt geteilte Beinplatten für medifa 5000 & Varianten 601120, 601700, 601820 (Paar)
Art.-Nr. 61660SF

- Einfache Verstellung mittels Gasdruckfeder von -90° bis +30°, schwenkbar um bis zu 180°, abknickbar
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- L x B: jede 720 x 250 mm
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 80 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61660)



Carbonlagerungsplatte für medifa 5000 & 6000
Art.-Nr. 61690

- Sehr gute Durchleuchtbarkeit (360°)
- An- und Abkopplung an Beckenteil oder unterem Rückenteil
- L x B: 750 x 540 mm
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 45 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar

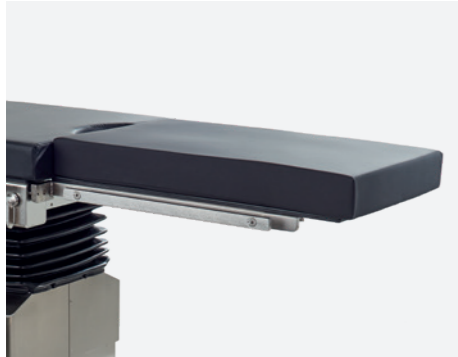

Kinderchirurgieplatte für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 61633


- An- und Abkopplung an Beckenteil
- L x B: 700 x 430 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Viskoelastisches SF-Polster, H = 60 mm, elektrisch ableitfähig, abnehmbar



Transfer-Beinplatte für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 61635

- Für die kurzzeitige Lagerung der Beine
- An- und Abkopplung an Beckenteil
- L x B: jede 900 x 500 mm
- Material: Edelstahl

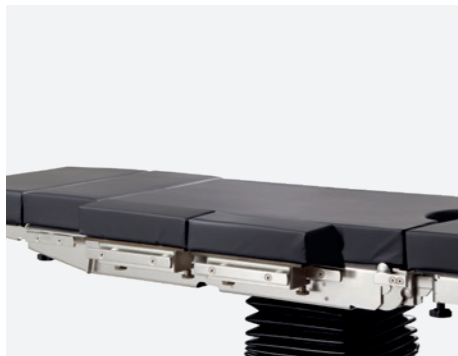

Verbreiterungssegmente für medifa 5000, 6000 & 7000 (Paar)

Art.-Nr. 61355SF


- Segmente zur Verbreiterung der OP-Tisch-Liegefläche
- L x B: je Segment 310 x 110 mm
- Integrierte Führungsschienen (EU)
- Polster: Viskoelastisches SF-Polster, H = 70 mm, elektrisch ableitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
- Alternativ mit PUR-Polster, H = 60 mm (Art.-Nr. 61355)



TUR-Spülset für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 61120

- Bestehend aus Ablaufschale, Eimer, Becken, Sieb, Schlauch und Fahrgestell
- Adaption am Beckenteileinschub
- L x B x H (Schale): 325 x 265 x 65 mm
- Volumen (Eimer): 15 Liter

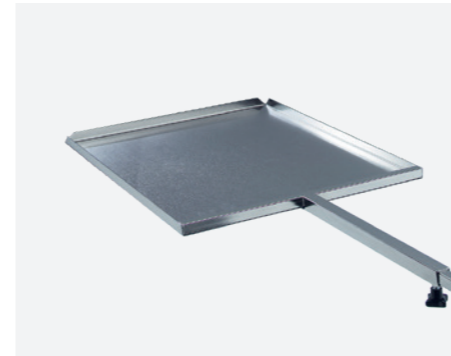

Kassettenschieber für medifa 5000 & 6000

Art.-Nr. 61640

- Zum Einschieben von Röntgenkassetten
- Ausziehbare Teleskopstange
- L x B x H: 470 x 385 x 16 mm
- Für Röntgenkassetten mit Maßen 14" x 17" (US) geeignet
- Material: Edelstahl



Transportbox für medifa 5000 BASIC

Art.-Nr. 61095

- Zum sicheren Transport des OP-Tisches
- Länge x Breite x Höhe: 1200 x 800 x 952 mm
- Material: Aluminium

Lieferbar auf Anfrage!

Ergänzendes Zubehör

Eine Vielzahl an Anbauzubehör ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten der Operationstische.

Zur zentralen Lagerung des Zubehörs, dient ein Zubehörwagen (Art.-Nr. 341045) aus poliertem Edelstahl.

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Prospekt „Zubehör für Operationstische“.



medifa

medifa
Member of REINSBERG GROUP

Kompetenz rund um den Operationsaal

Die medifa GmbH bietet als international führender Hersteller von Medizinprodukten innovative Produkte und Lösungen für Operationssäle, mobile Hybrid-Operationssysteme und andere Bereiche in Krankenhäusern oder ambulanten OP-Zentren an. Das breite Produktportfolio umfasst mobile OP-Tische und OP-Zubehör, mobile Carbon-OP-Tische, Operationsleuchten, sowie Untersuchungs- und Behandlungstühle.

Die medifa GmbH ist eine Firma der Reinsberg Group, einem führenden und global tätigen europäischen Hersteller von Medizinprodukten und Lösungen für Krankenhäuser.

Die Entwicklung, Konstruktion und Produktion der medifa Produkte finden in Deutschland statt. Mit einem großen Wertschöpfungsanteil in der Unternehmensgruppe garantiert medifa seinen Kunden schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Qualität „Made in Germany“ gemäß zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards.

medifa orientiert sich konsequent an den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Kunden. Im Einklang mit unserem Slogan „we care“ können sich Kunden aus aller Welt auf erstklassige Beratung, Verarbeitung und Qualität aus einer Hand verlassen.

Produkte

- Operationsleuchten (medifa H!Light)
- Mobile Operationstische
- Mobile Carbon-Operationstische für minimalinvasive Anwendungen
- Zubehöre für Operationstische und -leuchten
- Untersuchungs- und Behandlungstühle (Gynäkologie, Urologie und Proktologie)
- Medizinisches Funktionsmobiliar

medifa weltweit



medifa

Member of REINSBERG® GROUP



medifa GmbH

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Deutschland
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
www.medifa.com
info@medifa.com

Version 01-24-DE
Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung vorbehalten.

www.medifa.com



Made in Germany

we care.